

Paskutinės instrukcijos peržiūros data 2024-10-11

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

indikatorius "Microstop 180/60"

karšto oro sterilizavimo kontrolei

IV klasė

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Indikacinės juostelės „Microstop 180/60“ skirtos vizualiai kontroliuoti, kaip laikomasi sterilizacijos režimo pakuotėse su instrumentais, sterilizuotais sausu karšto oro sterilizatoriuose 180 ° C temperatūroje 60 minučių.

1.2. Indikatoriaus juostelės "Microstop 180/60" gaminamos su lipniu sluoksniu kitoje indikatoriaus pusėje, padengtos apsaugine danga ir tiekiamos perforuotų lakštų pavidalu.

Priekinėje indikatoriaus pusėje yra mėlynos spalvos pradinė žyma, tekstinis žymėjimas, nurodantis sterilizavimo režimo būdą ir parametrus.

1.3. Indikatoriaus juostelės "Microstop 180/60" priklauso IV rodiklių klasei pagal EN ISO 13485:2016; EN ISO 14971:2012; ISO 15223-1:2012, IDT; EN 62366:2008, IDT standartus.

Indikatorių juostelės "Microstop 180/60" yra vienkartinio naudojimo

2. APIMTIS

Taikymo objektas: karšto oro sterilizatoriai

3. NAUDOJIMAS

3.1. Prieš tai sulenkę perforavimo liniją, atskirkite indikatoriaus juostelę nuo lakšto.

3.2 Indikatoriaus juostelės "Microstop 180/60" dedamos į pakuotes su sterilizuotais produktais.

Į kiekvieną pakuotę dedama bent viena juostelė (galima dėti kelias juosteles, priklausomai nuo pakuotės tūrio ir matmenų).

3.3. Pasibaigus sterilizavimo procesui, juostelės indikatoriaus sluoksnio spalva turi atitikti nurodytą atitikties spalvą karšto oro sterilizatorius (ruda) arba autoklavas (violetinė)

3.4. Kontrolės rezultatą patvirtinantys rodikliai įklijuojami į „Sterilizacijos įrašų knygą“, kuri saugoma kaip archyvinis dokumentas.

4. TAIKymo SAVYBĖS

Po sterilizavimo indikatoriaus sluoksnio spalva gali būti skirtingo sodrumo.

Jei indikatoriaus sluoksnio spalva yra šviesesnė arba nepasikeitė, tai rodo sterilizavimo parametrų nesilaikymą.

Pakuotės su indikatoriais, kurios nepasiekė reikiamos spalvos, laikomos nesteriliomis ir turi būti iš naujo sterilizuotos.

Sterilizacijos proceso metu galima nedidelė indikatorių deformacija, kuri neturi įtakos kontrolės rezultatams.

5. LAIKYMO SĄLYGOS IR TINKAMUMO LAIKAS

Juostelės „Microstop 180/60“ laikomos perforuotu lakštu pavidalų gamintojo uždaroje pakuotėje, esant temperatūrai nuo +8 iki +25°C ir santykinei oro drėgmei iki 80% atstumu nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

Tinkamumo laikas nuo išdavimo datos yra 36 mėnesiai.

6. TRANSPORTO SĄLYGOS

Gamintojo pakuotėje esančios juostelės „Microstop 180/60“ gali būti gabenamos visomis transporto rūšimis pagal galiojančias krovinių gabenimo taisykles.

7. GAMINTOJO GARANTIJA

Gamintojas garantuoja, kad juostelės atitinka EN ISO 13485:2016 standarto reikalavimus, atsižvelgiant į transportavimo, laikymo ir naudojimo taisykles.

8. PAKAVIMAS

Juostelės „Microstop 180/60“ supakuotos į tam skirtus popierinius vokus, po 1000 vnt. kiekviename voke.

9. IŠMETIMAS

Indikacinės juostelės „Microstop 180/60“ nekenkia žmonių sveikatai ir aplinkai ir gali būti išmestos kaip buitinės atliekos.

Gamintojas

"Microstop"

Gamybos adresas: Ukraina, 02099, Kyjivas, Zroshuvalna g., 5

